



ヘッドマウントの大きさとカメラの向きの調整

ヘッドマウント後部のレバーを起こして利用者の頭部の大きさに合わせます。後頭部のマウントが下へずれるとカメラが上を向いてしまいますので、できるだけ地面に対して水平になるように調整します。次にカメラの向きを調整します。遠くを見るときはカメラは水平でよいのですが机の上のものや手にもったものを見てもらうときはカメラを下に かつ少し内側に向けて固定します。

電源の入れ方と再起動の方法

- ① 送信機の電源コネクタを下にして右側面の短い方のボタン（ギザギザが入っている）を3秒間押します。
- ② 約30秒後に「ハローモト」と合成音声がかかります。
- ③ さらに30秒待ってからカメラのケーブルを電源コネクタに差し込みます。先端の金属部分に引っかかりがある方が端子裏面です。
- ④ 「カメラが接続されました」と聞こえたらカメラ先端下のボタンを1回だけゆっくり軽く押します。
- ⑤ 接続されたらサポーターと会話を始めます。
- ⑥ 会話が終了したらカメラ先端下のボタンを押します。普段は送信機の電源を切る必要はありません。
- ⑦ 操作がうまくできないときはギザギザボタンを10秒長押しすると再起動しますので②から始めてください。

Wi-Fiの設定手順（ご自宅にWi-Fiをお持ちの方のみ）

- ① 送信機（Android）画面下の○を押しホーム画面にする。
- ② 上向き矢印（への形）を押しアプリを一覧表示させる。
- ③ 設定ボタン（歯車マーク）を押す。
- ④ ネットワークとインターネットをクリック。
- ⑤ Wi-FiをONをクリック。
- ⑥ ご自宅のSSIDが表示されたらパスワードを入力し接続を押す。

ウェアラブルカメラとAndroid送信機のお問い合わせは
株式会社リモートアシスト 06-4980-3579
または info@remote-assist.jp へお願い致します。

送信機カバーについて

本サービスの送信機専用のカバーをご用意いたしました。金具が上でファスナーが右側にくるように置き、送信機のボタンが右、ケーブル接続部分が下にくるようにカバーに入れてお使いください。

<お願い> 送信機はバッテリーの役割を持っています。ご就寝前に充電して頂きますようお願いいたします

ストラップは、市販品をお買い求めください👉



👉音量/
電源ボタン

ウェアラブルカメラとAndroid送信機のお問い合わせは
株式会社リモートアシスト 06-4980-3579
または info@remote-assist.jp へお願い致します。